



Sicherheitsanforderungen/Empfehlungen für elektrisch höhenverstellbare Behandlungsliegen

Liebe Kundinnen und Kunden,

dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die erhöhten Sicherheitsanforderungen/Empfehlungen für elektrisch höhenverstellbare Behandlungsliegen gemäß der Information der obersten Landesbehörden und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) einzuhalten und bei Ihren Therapieliegen zu prüfen. Um gemeinsam mit Ihnen eine gute Bewertung Ihrer Liegen durchführen zu können, ist eine Rückmeldung sehr hilfreich. **Gemeinsam finden wir eine Lösung!**

Bitte beantworten Sie folgendes:

- 1) Das Baujahr Ihrer Liege? (Typenschild, Seriennummer)
- 2) Die Marke des eingebauten Motors? (Typenschild, Baujahr)
- 3) Gab es eine Anpassung, oder den Einbau eines neuen Motors?

Wenn Ja, wann und welche Marke:

Sollte Ihr **Motor älter als 10 Jahre** sein, empfehlen wir Ihnen, dass Sie diesen vorsorglich durch einen neuen Motor ersetzen, oder die Anschaffung einer neuen Liege.

- 4) Haben Sie einen Fußbügel an Ihrer Liege?

Folgende Punkte können Sie prüfen, wir empfehlen, dass Sie sich an die erhöhten Sicherheitsanforderungen des [BfArM](#) halten:

- 1) Haben Sie bereits ein Sicherheitskonzept erarbeitet? (www.bgw-online.de/therapieliegen)
- 2) Ist/sind Ihre Therapieliege/n mit einer Sperrbox / oder einem Sicherheitspin ausgestattet?



- FREI medical verbaut einen Sicherheitspin bei allen elektrisch höhenverstellbaren Behandlungsliegen seit dem Jahr 2005.
- Falls kein Sicherheitspin vorhanden ist, kann bei elektrisch höhenverstellbaren Behandlungsliegen eine Sperrbox nachgerüstet werden.

Mindestens einer dieser Punkte (3;4;5) muss zusätzlich erfüllt sein

Fußbügel

- 3) FREI medical verbaut Fußbügel mit Umkehrlogik bei allen elektrisch höhenverstellbaren Behandlungsliegen seit dem Jahr 2004.



Fußtaster-/schalter

- 4) Fußtaster-/schalter ohne Schaltlogikmotor vorhanden? Falls JA, dann ist zu empfehlen, dass:




Empfehlung 1): Fußtaster/ -schalter stilllegen. Falls keine weitere Verstellmöglichkeit gegeben ist, kann mit einem Handschalter nachgerüstet werden.

Empfehlung 2): Doppelschaltlogikmotor kann zusätzlich nachgerüstet werden.

Handschalter

- 5) Fußtaster-/schalter ohne Schaltlogikmotor vorhanden? Falls JA, dann kann ein Handschalter nachgerüstet werden.

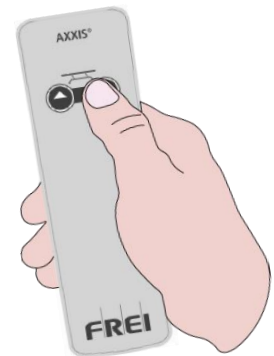

Nachrüstkosten

Zu 2): FREI Sperrbox = ab 141,50 €

Zu 4): Empfehlung 1): Handschalter ab 155,00 €

Empfehlung 2): je nach Ausführung (1 Motor oder 2 Motoren): ab 382,97 €

Zu 5): Empfehlung: Handschalter 155,00 €

Alle Preise sind Netto ausgezeichnet zzgl. Aufwandskosten. Sie werden je nach Bedarf aufgeführt.

Für weitere Hilfestellungen steht unser Team Ihnen gerne telefonisch, oder per Mail, zur Verfügung.

Ihr FREI medical Team